



chirosan® plus

Vysoce účinný
a ekonomický

Práškový dezinfekční prostředek na bázi generované kyseliny peroxyoctové určený k dezinfekci operačního instrumentaria, pro druhý a vyšší stupeň dezinfekce nástrojů, rigidních i flexibilních endoskopů a povrchů zdravotnických prostředků.

Naše plus:

- Plné spektrum účinnosti
- Kombinace 3 enzymů
- Účinný od 5 min
- Rozpustný, nepěňivý
- Stabilita roztoku 36 hodin

Oblast použití:

chirosan® plus je určen k manuální dezinfekci a čištění nástrojů a pomůcek bezprostředně po použití ponořením do předem připraveného pracovního roztoku. Také je vhodný pro použití v UZV čistíčkách.

Přípravek je vhodný také pro dezinfekci:

- povrchů a ploch zdravotnických prostředků otřením (vodoléčebné vany)
- dentálních otiskovacích hmot
- anesteziologického příslušenství
- tonometrů
- dýchacích masek
- endoskopů, inkubátorů, apod.

chirosan® plus je materiálově kompatibilní s běžnými materiály používanými ve zdravotnické praxi. Doporučuje se na nástroje a pomůcky z chirurgické oceli, skla, plastu, pryže, porcelánu, keramiky a plexiskla. Není vhodný na nástroje z mosazi, mědi, hliníku a na poniklované nebo pochromované nástroje s mechanicky narušeným povrchem.

Návod na použití:

Příprava roztoku: Do dezinfekční nádoby přesně odměřte množství vody o teplotě 20 °C ±1. Vsypte odměřené množství prášku chirosan® plus dle dávkovací tabulky a důkladně zamíchejte. Po 15-ti minutové aktivaci a opětovném důkladném promíchání je roztok připraven k použití.

Nástroje určené k reprocessingu se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněny všechny

duté části po stanovenou dobu expozice. Poté se nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou vodou.

Plochy zdravotnických prostředků a pomůcek lze dezinfikovat a čistit také pomocí otěru. Silně znečištěné plochy se nejprve mechanicky očistí a potom dezinfikují.

Použití	Koncentrace	Expozice
Čištění a dezinfekce nástrojů a pomůcek	0,5%	15 min.
Druhý a vyšší stupeň dezinfekce	2%	10 min.
Dezinfekce povrchů zdravotnických prostředků	1%	5 min.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, plně virucidní, mykobaktericidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Účinnost	Norma	Koncentrace při expozici				
		5'	10'	15'	30'	60'
A – Baktericidní vč. MRSA	EN 13727+A2 ²	0,5%				
	EN 14561 ²	0,5%				
(V) – Levurocidní	EN 14562 ²	0,5%				
V – Fungicidní (<i>C. albicans</i> , <i>A. brasiliensis</i>)	EN 13624 ²		2%		1%	
	EN 14562 ²					
M – Mykobaktericidní	EN 14348 ²			0,5%		
	EN 14563 ²	2%		1%		0,5%
B – Virucidní (<i>adeno</i> , <i>polio</i> , <i>noro</i> – MNV)	EN 14776 ²		2%		0,5%	
(B) – Virucidní (<i>Vaccinia</i>)	DVV/RKI ² EN 14476+A1 ²	0,5%				
(B) – Virucidní (<i>BVDV</i>)	DVV/RKI ²			0,5%		
	EN 14476+A1 ²	0,5%				
(B) – Virucidní (<i>Rotavirus</i>)	EN 14476+A1 ²	2%	1%		0,5%	
C – Sporocidní (<i>B. subtilis</i> , <i>C. difficile</i>)	EN 13704 ¹		2%		1%	0,5%

1 – Nižší zátěž, 2 – Vyšší zátěž

chirosan® plus

Odborné posudky a expertízy:

Testy materiálové kompatibility,
Chirurgické a stomatologické
instrumentarium: Medin a. s.

Testy materiálové kompatibility,
flexibilní endoskopy: Karl Storz

Testy inkubátory:
Státní zdravotní ústav Praha

Testy pro dentální otiskovací hmoty:
VFN – Ústav klinické a experimentální
stomatologie

Testy mikrobiologické účinnosti:
Chemila, spol. s r. o.
Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě



Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Důsledně dodržujte instrukce k použití. Není vhodný na nástroje z mosazi, mědi, hliníku a na poniklované nebo pochromované nástroje s mechanicky narušeným povrchem.

Doba expirace:

24 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIb [CE 1023]

Složení:

chirosan® plus obsahuje následující aktivní látky:

- in situ generovaná kyselina peroxyoctová
(2% roztok obsahuje více než 1000 ppm kyseliny peroxyoctové)

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled	bílý prášek
zápach (vůně)	bez parfému
hodnota pH (2% roztok)	7,5–8,5

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
chirosan® plus	1,5 kg kbelík 6 kg kbelík	1 1



Životní prostředí:

Společnost Schulke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Společnost Schulke CZ, s.r.o. je držitel certifikátů ISO 13485 a ISO 9001.



Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445, 735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: +420 558 320 260
www.schulke.cz

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SR: +421 903 244 600
e-mail: schulkecz@schulke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3, 971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 577
www.schulke.sk