



schülke -†



Extra
čistící síla a ochrana
personálu

gigazyme® X·tra

Tekutý enzymatický mycí přípravek s dezinfekčními účinky, vhodný pro manuální čištění a dezinfekci endoskopů a chirurgických nástrojů. Obsahuje trojkombinaci enzymů (lipáza, amyláza, proteáza), které účinně rozkládají bílkoviny, tuky i cukry. Vyniká svou výjimečnou mycí účinností a schopností snadno odbourávat organické znečištění z nástrojů. Díky současnému dezinfekčnímu účinku zajišťuje ochranu personálu pracujícího s infekčním materiálem.

Naše plus:

- Obsahuje trojkombinaci enzymů – lipáza, proteáza, amyláza
- Excelentní čistící schopnost a mimořádná šetrnost k endoskopům a nástrojům
- Vhodný na manuální čištění a také pro uzv myčky
- Dezinfekční účinnost na bakterie, fungi a viry (HIV/HBV/HCV)
- Vynikající materiálová kompatibilita
- Krátká doba expozice do 15 min.
- Příjemná vůně

Oblast použití:

gigazyme® X·tra je vynikající čistič na termostabilní i termosensitivní nástroje všech druhů, a to díky vyvážené receptuře obsahující kombinaci vysoce kvalitních enzymů a povrchově aktivních látek. Současně, díky dezinfekčním účinkům na bakterie, viry a fungi, je personál ochráněn před případnou kontaminací a infikováním nebezpečnými patogeny, jako je např. HIV a HBV.

Návod na použití:

Pro čištění a dezinfekci nástrojů se ředí studenou vodou na požadovanou koncentraci. Endoskopy a nástroje určené k reprocessingu, se ponoří do připraveného roztoku tak, aby byly zcela ponořené a roztokem byly naplněny všechny duté části po stanovenou dobu expozice. Po expozici a následném čištění, se endoskopy a nástroje vyjmou z roztoku a důkladně se opláchnou pitnou vodou.

Pracovní roztok je použitelný po dobu 1 dne v závislosti na znečištění. Přípravek není vhodný pro závěrečnou dezinfekci kritických a semikritických zdravotnických prostředků.

Nedoporučuje se míchat gigazyme X·tra s jinými detergenty.

Použití	Koncentrace	Expozice
Manuální čištění a dezinfekce nástrojů a endoskopů (včetně použití v UZV myčkách)	1%	15 min.
	2%	5 min.

Pro dosažení nejlepšího čistícího účinku je doporučeno používat 2% koncentraci.

Spektrum účinnosti:

Baktericidní, levurocidní, virucidní na BVDV / Vaccinia (HIV/HBV/HCV)

Účinnost	Norma	Expozice	
		5 min.	15 min.
Baktericidní	EN 13727	1%	0,5%
	EN 14561	2%	1%
Levurocidní (C. Albicans)	EN 13624	1%	0,5%
	EN 14562	2%	1%
Virucidní (BVDV)	DVV/RKI	0,5%	
Virucidní (Vaccinia)	DVV/RKI	2%	1%

Všechny koncentrace jsou deklarovány pro vysokou zátěž.

Složení:

100 g gigazyme® X·tra obsahuje následující aktivní látky:

- 7,7 g didecyldimethylammonium chloride
- 0,4 g polyhexamethylene biguanide

Další složení:

- 15 – 30% neionogenních tenzidů, enzymy, parfém

Fyzikálně–chemické vlastnosti:


vzhled hodnota pH	zelená kapalina cca 7,5 (20 °C)
----------------------	------------------------------------



gigazyme® X·tra

Čistící účinek ve srovnání s konkurenčními produkty:

Porovnání zbytkových bílkovin po ponoření do roztoků dezinfekčních přípravků na příslušnou dobu expozice.

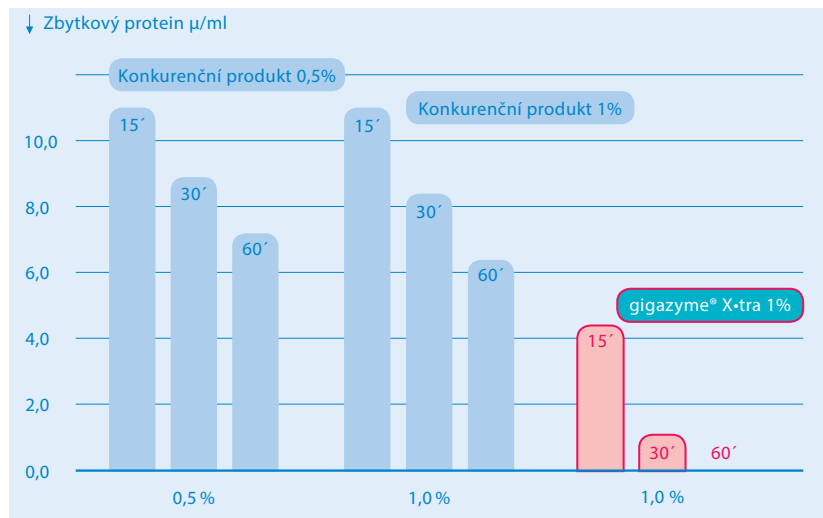

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
gigazyme® X·tra	2l	5
	5l	1

Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Nedoporučuje se míchat **gigazyme X·tra** s jinými detergenty.

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.

Doba expirace:

18 měsíců

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIb [CE 0297]



Schülke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.

Air Liquide
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Distributor v ČR:

Schülke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schülke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk

Ver.: 13032017