



**Sporocidní účinek**

Dezinfekční utěrky na bázi kyseliny peroctové, určené k dezinfekci povrchů zdravotnických prostředků. Vhodné zejména na dezinfekci kontaktních ploch zdravotnických prostředků a také povrchů v okolí pacientů. Široké spektrum účinnosti včetně bakteriálních spór.

## mikroqid<sup>®</sup> PAA wipes

### Naše plus:

- Sporocidní účinnost
- Možno používat až 28 dní po otevření
- Snadné a rychlé použití
- Schváleno pro sondy TEE\*

### Oblast použití:

Dezinfekční ubrousky **mikroqid<sup>®</sup> PAA wipes** se vyznačují širokým spektrem účinnosti (vč. bakteriálních spór), krátkou dobou expozice na mikroby a zároveň výbornou materiálovou kompatibilitou. Z tohoto důvodu jsou ideálními dezinfekčními utěrkami pro aplikaci v oblastech s vysokým rizikem přenosu patogenních zárodků, jako jsou např. izolační pokoje, operační sály, jednotky intenzivní péče, endoskopie nebo také neonatologie. Velmi vhodné jsou také pro dezinfekci malých ploch v okolí pacientů a dále ploch, které jsou v častém kontaktu s rukama nebo pokožkou personálu a pacientů. Díky sporocidnímu účinku jsou vhodné pro dezinfekci při výskytu *Clostridium difficile*.

Ubrousky jsou vhodné na dezinfekci veškerých neporézních povrchů zdravotnických prostředků.

Také jsou vhodné pro dezinfekci:

- sond TEE\*
- nasofaryngoskopů (ORL)
- ultrazvukových sond\*

### Návod na použití:

Nasaďte si ochranné rukavice. Odstraňte předem z povrchů viditelné nečistoty. Vyjměte z dózy potřebný počet ubrousků a otřete jimi povrchy určené k dezinfekci; dbejte přitom na důkladné smočení povrchů. Kryt dózy uzavřete co nejdříve po vytažení potřebného množství ubrousků.

### Účinnost:

Baktericidní, plně virucidní, tuberkulocidní, fungicidní, sporocidní

Účinnost	Norma	Expozice
Baktericidní	EN 13727 <sup>2</sup>	30 s
	EN 13697 <sup>2</sup>	5 min.
Levurocidní ( <i>C. Albicans</i> )	EN 1650 <sup>2</sup>	1 min.
	EN 13624 <sup>2</sup>	
Fungicidní ( <i>A. Niger</i> )	EN 13624 <sup>2</sup>	2 min. 5 min.
	EN 1650 <sup>2</sup>	
Virucidní (Adeno)	prEN 14476 <sup>2</sup>	1 min.
Virucidní (Noro)	prEN 14476 <sup>1</sup>	1 min.
Virucidní (Polio)	prEN 14476 <sup>2</sup>	15 min.
Virucidní (SV40)	prEN 16615 <sup>1</sup>	1 min.
Tuberkulocidní ( <i>M. Terrae</i> )	EN 14348 <sup>2</sup>	15 min.
Sporocidní ( <i>B. Subtilis</i> )	EN 14347 <sup>1</sup>	5 min.
	EN 13704 <sup>1</sup>	15 min.

1 – nižší zátěž, 2 – vyšší zátěž

### Použití výrobku schváleno pro:

- sondy TEE Philips\*
- ultrazvukové hlavice Philips\*
- endoskopy Karl Storz

\* Tato schválení jsou omezena na určité skupiny produktů. Detailní informace obdržíte prostřednictvím našeho oddělení zákaznického servisu.

# mikroqid® PAA wipes

## Složení:

100 g roztoku mikroqid® PAA wipes obsahuje následující aktivní látky:

- 0,06 g kyseliny peroctové

**další složení:** peroxid vodíku, kyselina octová

## Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled	ubrousky napuštěné bezbarvým roztokem
hustota	cca. 1,02 g/cm <sup>3</sup> / 20 °C
hodnota pH	cca. 2,2 / 20 °C

## Zvláštní upozornění:

Určeno pro profesionální trh. Používejte ochranné rukavice (např. z nitrilkaučuku). Po použití dózu vždy těsně uzavřete. Chraňte před horkem a slunečním světlem. Výrobky mikroqid® PAA wipes nejsou vhodné pro povrchy z mosazi, mědi ani pro chromované plochy. Nepoužívejte na poškozené kovové povrchy. Před použitím se informujte u výrobce na materiálovou kompatibilitu s daným materiálem.

## Logistické informace:

Název produktu	Balení	Ks v kartonu
mikroqid® PAA wipes	dóza 50 utěrek, rozměry utěrky 20 x 30 cm	10 dóz

## Doba expirace:

12 měsíců

## Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIb [CE 0297]

## Příslušenství:

	Číslo výrobku
držák na zeď, na dózu s Mikroqid jumbo wipes	134421

## Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Schülke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.

**Air Liquide**  
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

## Další informace:

Navštivte webové stránky:

[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)

## Výrobce:

**Schülke & Mayr GmbH**  
Robert Koch Str. 2  
22851 Norderstedt, Germany  
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0  
+49 (0) 40 - 52100 - 318  
[www.schuelke.com](http://www.schuelke.com)  
[mail@schuelke.com](mailto:mail@schuelke.com)

## Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 806 894  
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368  
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808  
e-mail: [schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v ČR:

Schülke CZ, s.r.o.  
Lidická 445  
735 81 Bohumín  
Česká republika  
tel.: +420 558 320 260  
[www.schulke.cz](http://www.schulke.cz)  
[schulkecz@schuelke.com](mailto:schulkecz@schuelke.com)

## Distributor v SR:

Schülke SK, s.r.o.  
Moštenická 3  
971 01 Prievidza  
Slovenská republika  
tel.: +421 465 494 587  
[www.schulke.sk](http://www.schulke.sk)