



Bezbarvý roztok na výplach ran pro čištění a zvlhčení chronických kožních ran.

octenilin® wound irrigation

Naše plus:

- Vynikající čistící a smáčecí vlastnosti
- Mimořádně dobře snášen pokožkou i tkáněmi
- Pro opakované, dlouhodobé používání
- Také pro ošetření těžce přístupných míst
- Pro všechny typy ran
- Sterilní

Oblast použití:

octenilin® wound irrigation je určený:

- Na čištění a zvlhčování chronických ran kůže
- Na konzervující zvlhčení obvazů a krytí ran
- Při převazech na uvolnění přilepených obvazů anebo jiných krustou přilepených krytí ran
- Na odstranění nečistot z ran pozůstávajících z nekrotické tkáně, fibrotických povlaků, patogenních zárodků a biofilmu
- V kombinaci s podtlakovou terapií V.A.C. Ultra, KCI

Návod na použití:

Jen na vnější použití na kožní rány. octenilin® wound irrigation je vhodný na opakované a dlouhodobé používání. Dlouhodobé používání oplachového roztoku octenilin® wound irrigation by mělo být pod lékařským dozorem. Součástí debridementu je vždy nejdříve oplach a čištění rány oplachovým roztokem octenilin® wound irrigation, a to tak, aby byly lehce rozpustné povlaky odstraněny dříve než bude rána dále ošetřena octenilin® wound gel-em.

Přípravek lze těsně před aplikací zahřát na teplotu těla. Vyplachujte rány roztokem přímo z lahve. K čištění lze používat obvazy nebo gázu napuštěnou přípravkem. Před sejmutím přilepených obvazů důkladně smočte obvaz roztokem, až poté opatrně uvolněte obvaz z rány tak, aby nebyla tkáň rány poškozena. Pro odstranění strupovitých povlaků, krust, nekrotických částí tkáně a biofilmů lze poté aplikovat octenilin® wound gel.

Přípravek je použitelný po dobu 8 týdnů po otevření.

Profil produktu:

octenilin® wound irrigation má díky nízkému povrchovému napětí velmi dobrou smáčivost a schopnost očistit povrch tkáně rány i u těžko přístupných míst, jako jsou ragády, fisury a záhyby ran. Nejde o dráždivou látku; nemá senzibilizující vliv; aplikace je bezbolestná, přípravek není toxický na tkáň a nebrání granulaci ani epitelizaci. Dobrá snášenlivost přípravku octenilin s tkáněmi byla prokázána dlouholetými klinickými zkušenostmi a klinickým výzkumem i u chronických ran.

octenilin® wound irrigation

Složení:

Ingredients: Aqua valde purificata, Glycerol, Ethylhexyglycerine, Octenidine dihydrochloride

Originalita a skladování:

Sterilní, v původním uzavřetém obale. Používejte jen bezchybné a neporušené balení. Chraňte výrobek před přímým sluncem. Skladujte od 15 °C do 25 °C. Po otevření je přípravek **octenilin® wound irrigation** nutné spotřebovat do 8 týdnů.

Fyzikálně–chemické vlastnosti:

vzhled	bezbarvá kapalina
pH (koncentrát)	cca. 5,4 / 20 °C (neředěný)
hustota	1,0 g/cm ³ / 20 °C
bod vzplanutí	nepoužitelné

Logistické informace:

Název produktu	Balení	Kód VZP	Ks v kartonu
octenilin® wound irrigation	350 ml láhev	0082010	10

Zvláštní upozornění:

Před použitím si důkladně přečtěte příbalovou informaci. Nepoužívejte v případě prokázané nebo předpokládané alergie na některou ze složek. Nesmí být aplikován do tkáně pod tlakem nebo injekčně. Nepoužívat k infuzi. Neužívat vnitřně. Nesmí se používat na hyalinní chrupavku, do očí, do uší, na močový měchýř nebo v břišní dutině. Z dutin v ranách musí být zajištěna drenáž (např. flexibilním drénem).

Obecné bezpečnostní pokyny:

Jen na vnější použití u kožních ran. Používejte jen bezchybné a nepoškozené balení. Chraňte výrobek před přímým slunečním zářením. K zamezení zavlečení choroboplodných zárodků je potřeba při použití přípravků octenilin dbát na to, aby obal nepřišel do kontaktu s ránou! Zdravotnický prostředek uchovávejte mimo dosah dětí.

Doba expirace:

48 měsíců

Přípravek je použitelný po dobu 8 týdnů po otevření.

Typ přípravku:

Zdravotnický prostředek tř. IIb (sterilní) [CE 0297]

Životní prostředí:

Společnost Schülke své produkty vyrábí inovativními a bezpečnými postupy šetrnými k životnímu prostředí, hospodárně a za dodržení vysokých standardů kvality.



Schülke & Mayr GmbH vlastní povolení na výrobu léčiv dle GMP certifikátu.

Air Liquide
HEALTHCARE Součást skupiny Air Liquide.

Další informace:

Navštivte webové stránky:

www.schulke.cz

Výrobce:

Schülke & Mayr GmbH
Robert Koch Str. 2
22851 Norderstedt, Germany
Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0
+49 (0) 40 - 52100 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Pro individuální dotazy a požadavky:

Produktový manažer: +420 724 760 757
Manažer prodeje ČR: +420 724 176 368
Manažer prodeje SK: +421 911 288 808
e-mail: schulkecz@schuelke.com

Distributor v ČR:

Schulke CZ, s.r.o.
Lidická 445
735 81 Bohumín
Česká republika
tel.: + 420 558 320 260
www.schulke.cz
schulkecz@schuelke.com

Distributor v SR:

Schulke SK, s.r.o.
Moštenická 3
971 01 Prievidza
Slovenská republika
tel.: +421 465 494 587
www.schulke.sk