



perform®

Práškový dezinfekčný prípravok na báze aktívneho kyslíka vhodný na dezinfekciu a čistenie zdravotníckych pomôcok a iných povrchov.

**virucídny
od 0,5%**

Naše plus:

- Univerzálne použitie
- Výborná materiálová kompatibilita (inkubátory)
- Kompletné spektrum biocídnej účinnosti
- Excelentný virucídny účinok

Oblasť použitia:

perform® sa odporúča na dezinfekciu a čistenie povrchov zdravotníckych pomôcok a iných povrchov otrením alebo ponorením do pracovného roztoku. Je vhodný na dezinfekciu priestorov so zvýšeným epidemiologickým rizikom a v priestoroch, ktoré majú vysoké nároky na užívateľský komfort. **perform®** má výbornú materiálovú kompatibilitu s problémovými materiálmi ako sú povrchy inkubátorov (akrylové sklo). Produkt sa odporúča na dezinfekciu ochranných a inhalačných dýchacích masiek, nácvikových resuscitačných figurín, vodoliečebných vaní, ...

Návod na použitie:

Pracovný roztok sa pripraví dôkladným rozmiešaním prípravku vo vlažnej vode. Napr.: 0,5% roztok = 1 x 40 g vrečko do 8 l vody. Pred dezinfekciou sa uistite, že na povrchu dezinfikovaného povrchu nie sú viditeľné nečistoty. Ošetrovaný povrch utrite textíliou namočenou v pracovnom roztoku. Malé vodeodolné predmety ponorte do pracovného roztoku, po predpísanej expozícii ich opláchnite vodou. Pri dezinfekcii dýchacích masiek a resuscitačných figurín odoberateľné časti ponorte do roztoku a zvyšok utrite textíliou namočenou v pracovnom roztoku. Po expozícii rozoberateľné časti opláchnite vodou a povrchy utrite vlhkou textíliou. Nepoužitý pracovný roztok je stabilný 30 hodín pri teplote 20 °C a 4 hodiny pri teplote 40 °C.

Použitie	Koncentrácia	Expozícia
Dezinfekcia a čistenie povrchov zdravotníckych pomôcok (ZP)	0,5%	30 min.
Dezinfekcia a čistenie povrchov ZP pri zvýšenej záťaži (ARO, JIS, ...)	1% 0,5%	30 min. 60 min.
Dezinfekcia vodoliečebných vaní	1,5%	5 min.

Spektrum účinnosti:

Baktericídny, virucídny, levurocídny, fungicídny, tuberkulocídny, mykobaktericídny, sporocídny

Účinnosť	Norma	Doba expozície							
		1 min.	2 min.	5 min.	15 min.	30 min.	1 hod.	2 hod.	
Baktericídny	DGHM ²					1%	0,5%		
	DGHM ¹				2%	0,5%			
	EN 13727 ¹	1%	0,5%						
	EN 13727 ²					1%	0,5%		
	EN 13697 ²					0,5%			
Levurocídny (C. albicans)	DGHM ¹				2%	0,5%			
	EN 13624 ¹				1%		0,5%		
Fungicídny (A. niger)	EN 13697 ²						1%		
Vírus inaktivačný (BVDV, Vaccinia)	DVV/RKI			0,5%					
Virucídny (Polyoma SV40)	DVV/RKI	0,5%							
Virucídny (Adeno)	DVV/RKI a EN 14476			0,5%					
	EN 14476 ¹			0,5%					
Virucídny (Noro)	EN 14476 ²					0,5%			
	DVV/RKI ²					2%			
Virucídny (Polio)	DVV/RKI ¹			2%					
	EN 14476 ¹			1%	0,5%				
	DVV/RKI			0,25%					
Mykobaktericídny (M. avium, M. terrae)	EN 14348 ¹				1%		0,5%		
	EN 14348 ²					1,5%	1%		
Tuberkulocídny (M. TBC)	DGHM ¹						0,5%		
	DGHM ²					3%	2%		
Sporocídny (C. difficile, B. subtilis)	EN 13697 ¹								1%

1 – nízka záťaž, 2 – vysoká záťaž

Zloženie:

Aktívne látky v 100 g výrobku perform®:

- 45 g monopersíran draselný, sodná soľ

Ďalšie zloženie:

5–15% anionaktívne tenzidy

< 5% neionogénne tenzidy

< 5% fosfonáty

< 5% mydlo

Fyzikálno–chemické vlastnosti:

granulát	
vzhľad	biely prášok / granulát
hustota	cca. 775 g/l
roztok	
vzhľad	bezfarebný
hodnota pH	cca. 4

Zvláštne upozornenia:

Len pre profesionálny trh. Pri skladovaní neprekračujte izbovú teplotu. Používajte ochranné rukavice (napr. z butylkaučuku). Pracovný roztok môže mať bieliaci účinok na veľmi citlivé farebné textilie.

Logistické informácie:

Názov produktu	Balenie	Ks v kartóne
perform®	vrecúško 40 g dóza 900 g	250 4

Doba expirácie:

24 mesiacov

Typ prípravku:

Zdravotnícka pomôcka tr. IIa [CE 0297],

Registračné číslo: bio/1216/D/16/CCHLP

Životné prostredie:

Spoločnosť Schülke vyrába svoje produkty inovatívnymi a bezpečnými postupmi šetrnými k životnému prostrediu, hospodárne a za dodržania vysokých štandardov kvality.



Schulke & Mayr GmbH vlastní povolenie na výrobu liečiv podľa GMP certifikátu.



Súčasť skupiny Air Liquide.

Ďalšie informácie:

Navštívte webové stránky:

www.schulke.sk

Výrobca:

Schülke & Mayr GmbH

Robert Koch Str. 2

22851 Norderstedt, Germany

Telefon +49 (0) 40 - 52100 - 0

+49 (0) 40 - 52100 - 318

mail@schuelke.com

www.schuelke.com

Individuálne otázky a požiadavky:

Produktový manažér: +420 724 806 894

Obchodný manažér SK: +421 603 244 600

Distribútor v SR:

Schulke SK, s.r.o.

Moštenická 3

971 01 Prievidza

Slovenská republika

tel.: +421 465 494 587

schulkesk@schuelke.com

www.schulke.sk